




...going one step further

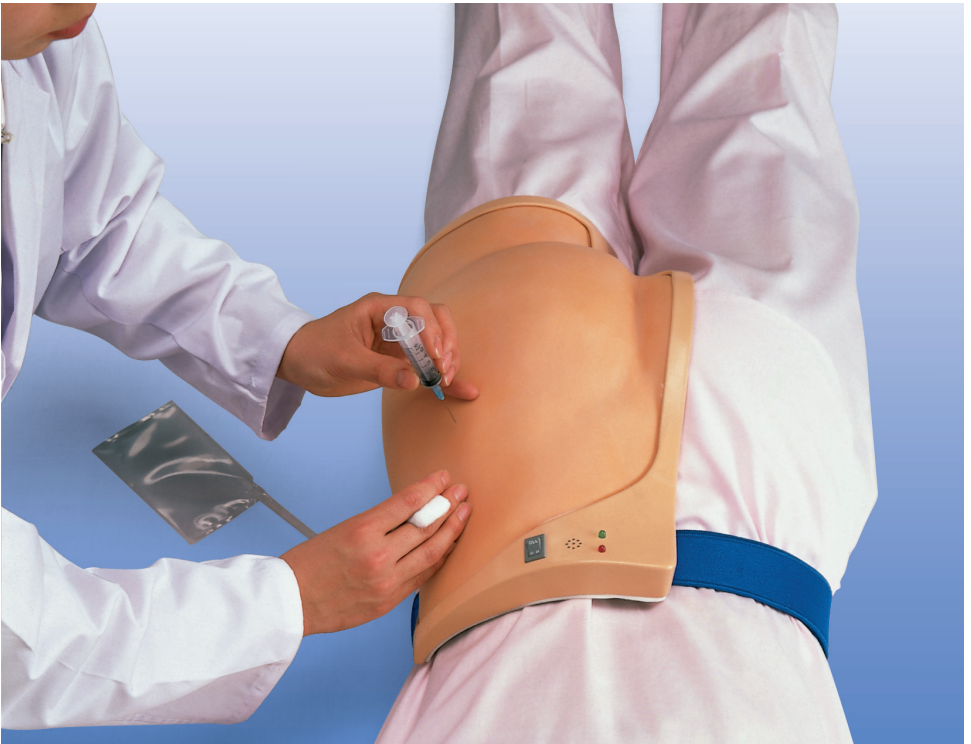

W30504


I.m.-Injektionsgesäß

Intramuskulär Injektionssimulator - Gesäß (umschnallbar)

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Verwendung gründlich durch.

❶ Legen Sie eine 9V-Batterie in das Batteriegehäuse.

❷ Betätigen Sie den Schalter für die Hauptstromversorgung.

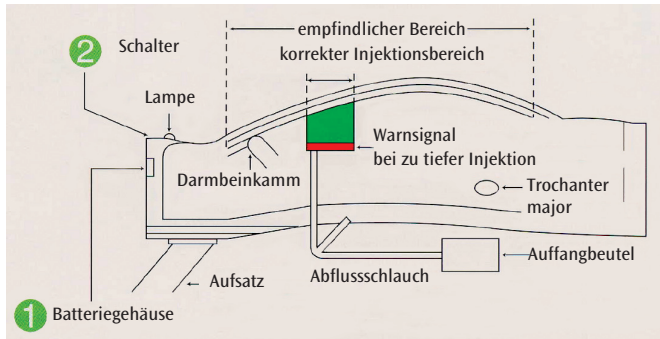

❸ Bei Verwendung allein:
Bringen Sie das Modell zur Verwendung auf der transparenten Form an.

❹ Bei Verwendung zu zweit:
Wickeln Sie den blauen Gurt um die Lenden der Person, die als Patient agiert. Die Person, die als Patient agiert, sollte auf dem Bauch liegen. Richten Sie den Simulator am Klebeband aus und befestigen Sie ihn mit dem blauen Gurt.

❺ Prüfen Sie den korrekten Injektionspunkt.

- Bei korrekter Injektion leuchtet ein grünes Licht auf. Nur dann wird Wasser injiziert, und das Injizieren ins Gesäß kann geübt werden.
- Bei falscher Injektion leuchtet ein rotes Licht auf und es ertönt ein Warnsignal. (An der Grenzlinie zwischen den korrekten und falschen Punkten können das rote und das grüne Licht gleichzeitig aufleuchten und ein Warnsignal kann ertönen.)



Warnhinweis für die Verwendung

- Säubern Sie den Simulator mit einem weichen Lappen und Spülmittel, wenn er schmutzig ist.
- Verwenden Sie kein Benzin, kein Verdünnungsmittel, kein Putzmittel, etc.
- Stellen Sie kein Gewicht auf die transparente Abdeckung. Diese kann dadurch beschädigt werden.
- Wasser kann **nur** injiziert werden, wenn **das grüne Licht aufleuchtet**. Wenn die grüne Lampe nicht aufleuchtet, versuchen Sie niemals Wasser zu injizieren. **Versuchen Sie niemals Wasser zu injizieren, wenn das rote Licht aufleuchtet oder wenn der Summer ertönt. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.**
- Gehen Sie bitte vorsichtig dem Gerät um, und lassen Sie es nicht fallen.

Lagerung

- Nachdem das Wasser in den Auffangbeutel abgeflossen ist, vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus dem Inneren des Abflussschlauches fließt. Legen Sie den Simulator in die transparente Abdeckung und lagern sie ihn mit dem **Gesäß nach oben ausgerichtet**.
- Korrekt injiziertes Wasser fließt nach kurzer Zeit ab.
Da der Simulator aus einem luftdurchlässigen Material hergestellt ist, trocknet er von allein aus. Verbleibende Wasserreste tropfen daher auch nicht in das Model.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- **Entfernen** Sie vor der Lagerung des Models **immer die Batterien**.
Wird die Batterie nicht herausgenommen, kann sie korrodieren und Fehler bei der elektrischen Leitung hervorrufen.